

hawo IntelligentScan™



SIEGELGERÄTE EINFACH BEDIENEN


Die gestiegenen Anforderungen an die sichere Sterilgutverpackung in Krankenhäusern und Kliniken stellen eine besondere Herausforderung an das medizinische Personal in den zentralen Sterilgutversorgungsabteilungen dar. hawo hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Gerätebedienung so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten. Mit hawo IntelligentScan™ revolutioniert hawo die Bedienung von Siegelgeräten und leistet einen wichtigen Beitrag für die sichere Verpackung von Medizinprodukten: Ganz einfach per Barcodescanner.

hawo IntelligentScan™



SICHERHEIT: Die neueste Generation der hawo Durchlaufsiegelgeräte verfügt über die hawo IntelligentScan™-Technologie und lässt sich vollständig mit einem Barcodescanner bedienen und einfach für verschiedene Verpackungsmaterialien konfigurieren. Der Scanner liest die individuell vorgegebenen Verpackungsinformationen ein und ordnet sie automatisch der entsprechenden Gerätefunktion zu. Das Ergebnis: Der Anwender erhält nur die Informationen, die er wirklich benötigt und damit mehr Sicherheit durch intuitive Bedienung.

Der Schlüssel zu diesem Plus an Sicherheit ist die dem optionalen Scanner beigefügte PC-Software hs 780 BR. Hiermit werden einmal alle notwendigen Gerätekonfigurationen, Druckdaten und komplette Druckerkonfigurationen für die individuellen Verpackungsmaterialien zentral ein- und als Barcodeliste auf einem Standarddrucker ausgegeben.

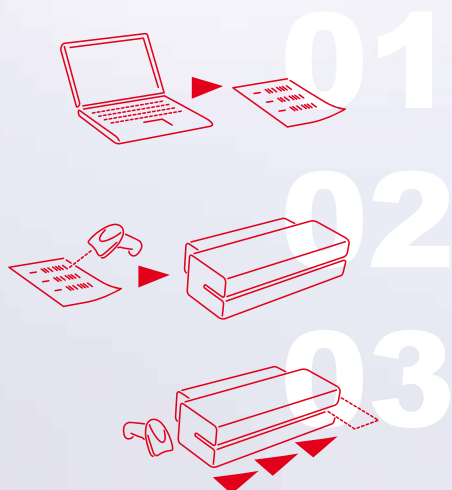

Einfach und sicher Verpacken in 3 Schritten:

- > Erstellen der Barcodelisten zur Konfiguration der Siegelgeräte mit Hilfe der Software hs 780 BR. Ausdrucken der Barcodeliste auf einem Standarddrucker.
- > Einlesen der Barcodes mit Hilfe des Barcodescanners hm 780 BR zur Programmierung des Siegelgerätes.
- > Starten des Siegelprozesses durch Einlegen der Sterilgutverpackung. Das Gerät druckt automatisch während des Siegelns die voreingestellten Informationen auf die Sterilgutverpackung.

hawo Durchlaufsiegelgeräte mit hawo IntelligentScan™:

- > hm 780 DC und hm 780 DC-V
- > hm 880 DC-V (ab 2011)
- > hm 3010 DC-V / hm 3010 DC-VI / hm 3020 DC-V / hm 3011 DE-V¹
- > hpl 3000 DC-V



SEAL CHECK MED: Auch bei der täglichen routinemäßigen Kontrolle erleichtert der Einsatz des Barcodescanners die Bedienung. **Die neuen Seal Check med Indikatorstreifen verfügen über einen aufgedruckten Barcode.** Wird dieser mit dem Scanner hm 780 BR eingelesen, schaltet das Durchlaufsiegelgerät mit hawo IntelligentScan™ automatisch in den Seal Check-Modus.

¹ Sondergerät für CLEERPEEL®-Folie. CLEERPEEL® ist eine eingetragene Marke der Sengewald Klinikprodukte GmbH